

[REF] 252020/252220/252520/253520

## UPUTSTVO ZA UPORABU



Verzija 2  
Revidirano 06/2026

  
Foshan United Medical Technologies Ltd.  
No. 1 Huixing Road, Yanbu, Dali, Nanhai,  
Foshan, Guangdong Province, China  
Post code: 528247  
www.umtmedical.com

[EU] [REP]  
Medwheat Tech Service GmbH  
Max-Planck-Straße 4  
85609 Aschheim b.  
München, Germany

### Distributed by:

INEL d.o.o.  
Polog b.b.  
88000 Mostar  
Bosnia and Herzegovina  
tel: +38736487136  
fax: +38736487346  
info@inel-mostar.ba  
www.inel-mostar.ba

### OPIS PROIZVODA:

Valnusorb A povoj za rane od kalcijevog alginata je sterilni netkani zavoj od kalcijevog/natrijevog alginata koji se sastoji od gellanog alginata. Valnusorb A obloga za rane od kalcijevog alginata visoko je upijajuća i prilagodljiva. Kako se eksudat iz rane apsorbira, alginat stvara gel, koji pomaže u održavanju vlažnog okruženja za optimalno zacjeljivanje rane, pomaže autolitičkom debridementu i bezbolnom uklanjanju iz rane.

### INDIKACIJE:

Valnusorb A kalcijev alginatni oblog za rane namjenjen je za liječenje kroničnih i akutnih rana s umjerenom do jakom eksudacijom, te za kontrolu manjeg krvarenja u površinskim ranama.

- Dekubitus
- Ulkus noge
- Venski i arterijski ulkus
- Dijabetički ulkus
- Razderotine
- Ogrebotine
- Rane transplantata i donatorska mjesta

Ostale indikacije uključuju postoperativne kirurške rane, traumatske rane, rane šupljina, površinske opekline i opekline djelomične debljine. Oblozi se mogu koristiti ispod kompresijskih zavoja. Također je prikladan za korištenje pod liječničkim nadzorom, u liječenju inficiranih rana ili rana kod kojih postoji povećan rizik od infekcije.

### KONTRAINDIKACIJE :

Valnusorb A kalcijev alginatni zavoj za rane nije namjenjen za korištenje na sljedećem:

- Kirurškoj implantaciji
- Suhim ranama
- Za kontrolu teškog krvarenja
- Pojedincima koji su osjetljivi na ili koji su imali alergijsku reakciju na zavoj.
- Ne koristi se ispod gaze

### OPREZ:

Posavjetujte se sa zdravstvenim radnikom ako se primijeti iritacija (crvenilo, upala), maceracija (izbijeljivanje kože), hiper-granulacija (pretjerano stvaranje tkiva).

Zavoj može prijanjati ako se koristi na ranama koje vrlo slabo izlučuju. Ako se zavoj ne može lako ukloniti, navlažite ga slanom otopinom prije uklanjanja.

Zavoj nije namijenjen za korištenje kao kirurška spužva i nije namijenjen za kontrolu teškog krvarenja. Moraju se razmotriti alternativne mjere u onim hitnim situacijama kada dolazi do iznimnog gubitka krvi.

Ne koristiti kod pacijenata s poznatom osjetljivošću na alginat.

Samo za vanjsku uporabu.

### UPUTE ZA UPORABU:

#### Priprema mjesta

- Očistite mrtvo tkivo kada je potrebno i ispirajte mjesta rane u skladu sa standardnim protokolima.
- Prema kliničkim indikacijama može biti poželjno zaštititi okolnu kožu proizvodom za zaštitu kože.

#### Odabir obloga

Odaberite veličinu obloge za rane Valnusorb A kalcij alginata koja je malo veća od rane, za ranu s šupljinama odaberite vrpču.

#### Primjena obloga

1. Izrežite (čistim škarama) ili presavijte oblog kako bi pristajao rani. Lagano ispunite duboke rane, pazite da oblog ne prekriva rubove rane.

2. Nanijeti izravno na ranu.
3. Pokrijte i učvrstite neokluzivnim ili poluokluzivnim sekundarnim povojem po izboru.

### Promjena i uklanjanje zavoja:

1. Valnusorb A kalcijev alginatni zavoj za rane može ostati u rani do 7 dana, ovisno o stanju pacijenta i razini eksudata.  
U početku će možda biti potrebno mijenjati zavoj svaka 24 sata ili kad god izgled rane nalaže da zavoj treba promijeniti.

2. Ponovno nanesite Valnusorb A kalcijev alginatni zavoj za rane kada se potpuno želirao i time postigao svoj kapacitet upijanja, ili kad izgled rane nalaže promjenu zavoja.

3. Za ponovno nanošenje nježno uklonite sekundarni zavoj. Ako se rana čini suhom, natopite Valnusorb A zavoj fiziološkom otopinom prije uklanjanja.

4. Nježno uklonite zavoj sa rane i bacite ga.

5. Ispirite mjesto rane prikladnim sredstvom za čišćenje rana prije nanošenja novog zavoja.

### SKLADIŠTENJE

- Čuvajte na hladnom i suhom mjestu.
- Nemojte ponovno koristiti , ponovna uporaba može uzrokovati ozbiljne infekcije.
- Nemojte ponovno sterilizirati
- Nemojte koristiti ako je pojedinačna vrećica oštećena/otvorena.
- Rok upotrebe ovog proizvoda otisnut je na pakiranju.

### SIMBOLI KORIŠTENI NA PAKIRANJU

|  |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|
|  | Jednokratna uporaba                                 |
|  | Ne resterilizirati                                  |
|  | Koristiti do: godina i mjesec                       |
|  | Sterilno. Metoda sterilizacija: radijacija          |
|  | Referentni broj proizvoda                           |
|  | Broj serije                                         |
|  | Oprez, vidi uputstvo za uporabu                     |
|  | Ne sadrži lateks                                    |
|  | Uvjeti skladištenja                                 |
|  | Proizvođač                                          |
|  | EU predstavnik                                      |
|  | CE oznaka                                           |
|  | Ne izlagati suncu                                   |
|  | Čuvati na suhom                                     |
|  | Ne koristiti ako je pakiranje otvoreno ili oštećeno |
|  | Medicinsko sredstvo                                 |
|  | Moguće reciklirati                                  |
|  | datum proizvodnje                                   |
|  | Unique device identifier                            |